

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Jak správně používat 3D NANOroušku FFP2/3 a přiložené filtry

**Zcela zásadní je správné nasazení i následné sejmutí roušky.**

#### **Postup nasazení roušky:**

1. Než začnete roušku používat, důkladně si omyjte ruce alkoholem, dezinfekčním mýdlem nebo gelem a vodou (mytí rukou by mělo následovat rovněž vždy po doteku přední části roušky).
2. Odtrhněte obal na určeném místě a vyjměte roušku z obalu.
3. Nasadte roušku na obličej, tak aby překrývala nos a ústa (horní část roušky je vyztužena tvarovatelným páskem, který patří na kořen nosu).
4. Postranní šňůrky nasadte za uši a upravte tak, aby rouška přiléhala k obličejí. Nejprve utáhněte gumičkou šňůrky v horní části uší. Následně utáhněte v dolní části uší tak, aby rouška lemovala Vaše tváře a bradu.
5. Přiměřeným tlakem dotvarujte nosní výztuhu roušky kolem kořene nosu.



Než začnete roušku používat, důkladně si omyjte ruce alkoholem, dezinfekčním mýdlem nebo gelem a vodou.



Odtrhněte obal na určeném místě a vyjměte roušku z obalu.



Nasadte roušku na obličej tak, aby překrývala nos a ústa (horní část roušky je vyztužena tvarovatelným páskem který patří na kořen nosu).



Postranní šňůrky nasadte za uši a upravte tak, aby rouška přiléhala k obličejí. Nejprve utáhněte pomocí gumičky šňůrky v horní části uší, následně v části dolní tak, aby rouška lemovala Vaše tváře a bradu.



Dotvarujte nosní výztuhu roušky přiměřeným tlakem kolem kořene nosu.


#### **Postup snímání roušky:**

1. Roušku sejměte z obličejí pomocí záušních šňůrek.
2. Po sejmutí roušky si omyjte ruce alkoholem, dezinfekčním mýdlem nebo gelem a vodou.

### Postup vkládání přiložených nano filtrů:

1. Před vyjmutím filtru z obalu si omyjte ruce alkoholem, dezinfekčním mýdlem nebo gelem a vodou.
2. Filtr vyjměte z obalu a vložte do připravené roušky.
3. Postranní části filtru vsuňte do vnitřních kapes roušky (špičatější část filtru patří do horní vyztužené části roušky).

\* Přiložené vkládací nano filtry doporučujeme používat na všech místech, kde dochází k pohybu osob v menší vzdálenosti než 2 m od sebe. Dále pak v prostorech se zvýšeným počtem osob, uzavřených prostorech a všude tam, kde je zvýšené riziko přenosu infekčních chorob.

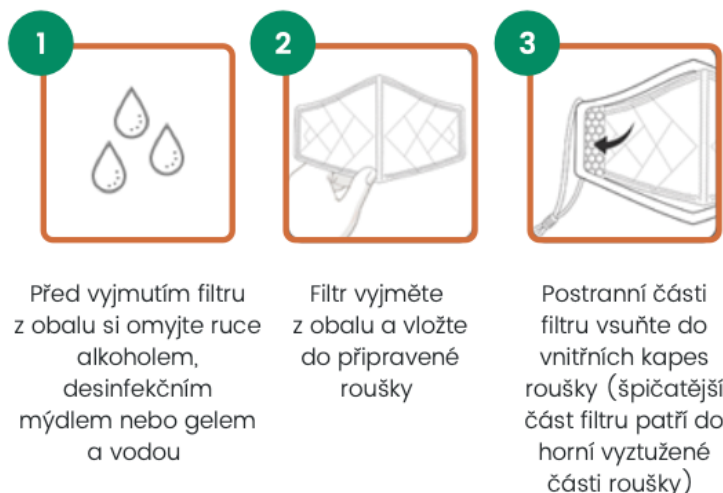

### Ochrana a opakované nošení roušky:

NANOroušku **po kratší době nošení** stačí z přední i zadní strany vydesinfikovat dezinfekčním sprejem Expertgel. Po důkladném zaschnutí je pak rouška znovu připravena k použití.

Po **delší době** používání doporučujeme NANOroušku **vyprat ručně nebo v pračce** při teplotě 30° C. **POZOR: ROUŠKU VŽDY PERTE BEZ AVIVÁŽE, BĚLIDEL A DALŠÍCH AGRESIVNÍCH PŘÍPRAVKŮ. ROUŠKU NESUŠTE V SUŠIČCE A NEŽEHLETE.** Po uschnutí je možné roušku opětovně použít. Rouška je určena na 200 a více praní.

### Ochrana a opakované nošení přiložených filtrů:

Po **8 hodinách** užívání filtr vyjměte z nano roušky a vydesinfikujte z obou stran pomocí dezinfekčního spreje Expertgel (**POZOR:** úplné promočení filtru je nežádoucí). Po uschnutí filtru je možné jej opět použít. Aby byla zachována životnost filtru, opakujte tento postup maximálně 10x.

### Upozornění:

- Veškeré příslušné certifikáty naleznete na stránkách [www.expertgel.cz/certifikaty-ffp2-ffp3/](http://www.expertgel.cz/certifikaty-ffp2-ffp3/)
- Samotná nano rouška s vloženým filtrem není jedinou ochranou, je potřeba dodržovat i ostatní doporučení pro ochranu zdraví.
- Vždy se ujistěte, že máte výrobek správně nasazen a je kompletní.
- Tento prostředek není ohnivzdorný, nepoužívejte jej tak v přímém kontaktu s otevřeným ohněm.
- NANOrouška s přiloženým filtrem je vhodná pro děti od 12 let.